

نکات ویژه برای استفاده از Vessel Sealing System

هشدار: قبل از شروع عمل جراحی با استفاده از جدول زیر مود Seal1 یا Seal2 را انتخاب نمایید. انتخاب اشتباه مود Vessel Sealing باعث پایین آمدن کیفیت Seal خواهد شد.

Seal 2


فقط شماره های زیر از ابزارآلات لیگاشور ساخت ولی لب:



(LS1500) - (LF1623 , LF1723 , LF1823 , LF1923)

(LF1644 , LF1744 , LF1844 , LF1944) - (LF1637 , LF1737 , LF1837 , LF1937)

(LF1212 , 1212A , LF2019) - (LS1520 , LF1520) - (BZ4212 , BZ4212A) - (LS1200)

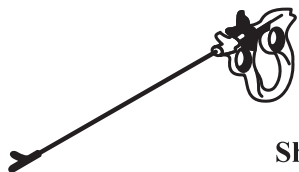

و یا BOWA LIGATOR ساخت BOWA آلمان

Shaft Diameter= 5mm

Seal 1

فقط شماره های زیر از ابزارآلات لیگاشور ساخت ولی لب:



Shaft
Diameter= 10 mm

(LS2110, LS2111) - (LS3090, LS3092) - (LS1037)

(LF4318 , LF4418) - (LS3110 , LS 3112) - (LS1020)



و یا BOWA Tissue Seal ساخت BOWA آلمان

هشدار: استفاده از مودهای seal1 و seal2 با هرگونه لوازم جانبی بغیر از آنچه در بالا مشخص شده اند ممکن است باعث ایجاد صدمه به بیمار و یا تیم جراحی بشود.

هشدار: هرگز از مودهای Bipolar عادی برای Vessel Sealing استفاده ننمایید، زیرا در این مودها قابلیت اطمینان کافی برای seal شدن عروق بزرگ وجود ندارد.

👉 در حین عمل جراحی، فک های ابزار جراحی را به وسیله ی پارچه های نخی و یا برس های نرم پلاستیکی تمیز نمایید و هرگز از اشیاء تیز و خراشنده استفاده ننمایید.